


サージカルマスクの着脱

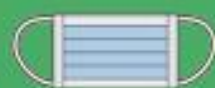

付け方の手順

- 
手指消毒
はじめに必ず
行いましょう
- 
針金部分が上側
「ひだ」が下向きに
なるように持つ
- 
針金部分を曲げて
鼻の形に合わせる
- 
ゴムひもを
耳にかける
- 
針金部分を押さえて
鼻の形に合わせる
- 
ジャバラを
あごの下まで伸ばして
鼻と口を覆う
- 
完了
呼吸器感染症の流行期は
標準予防策として
サージカルマスクを
着用しましょう
自分に合った大きさのマスクを選び
すき間なく鼻にフィットさせましょう。

外し方の手順



1行為1消毒！

ひとつ作業を行うごとに
手指消毒を徹底しましょう。

○消毒剤はワンプッシュ押しきり！



使用後は汚染！

使用済み防護具の表面は
ウイルスに汚染されているため
その都度廃棄しましょう

- 
手指消毒
はじめに必ず
行いましょう
- 
サージカルマスクを外す
表面に触れないように
ゴムひもを持って外す
- 
外したマスクを廃棄
使用済みのマスクは
即座に廃棄
- 
手指消毒
1行為1消毒
最後までていねいに

